

Використання відбиткового матеріалу Identium®

Враження лікарів-стоматологів



Д-р Расмус
Ренціхаузен, лікар-
стоматолог,
приватна практика,
Ельце, Німеччина

– Назва Identium® використовується для широкого спектру різних твердих/в'язких вінілсилоксанефірів. За якими критеріями Ви підбираєте матеріал для кожної ситуації?

– Критерієм вибору матеріалу з високою кінцевою твердістю є прецизійність розміру елементів, з яких потрібно зробити відбиток. Окрім того, перевагою відбитків із Identium® Heavy є уникнення перекосів на ділянках відбитку при роботі з імплантатами чи телескопічними коронками. Критерієм для використання матеріалу з низькою кінцевою твердістю є можливість повернення в початкову форму деформації піднутрень або тонких ділянок препарування.

– Як Ви використовуєте Identium® у щоденній практиці?

– Identium® у моїй практиці використовується при всіх показаннях. Відбитки подвійного за-

мішування для імплантатів, телескопічних коронок, при протезуванні з використанням коронок та мостоподібних протезів, функціональні відбитки, піднутрення – у всіх випадках застосовується Identium®. Використання Identium® настільки ж універсальне, як раніше Impregnum™.

– Чи є спеціальні прийоми, які полегшують використання Identium®?


– Найпростіший прийом – це виготовлення для відбитку індивідуальної ложки, що ми завжди робимо.

– Як реагують Ваші пацієнти на Identium®?

– Позитивно, після багатьох років використання Impregnum™ негативні відгуки про присмак матеріалу відсутні.

– Які відгуки із зуботехнічної лабораторії про відбитки, виготовлені з Identium®?

– Краща чіткість матеріалу («краща, ніж у

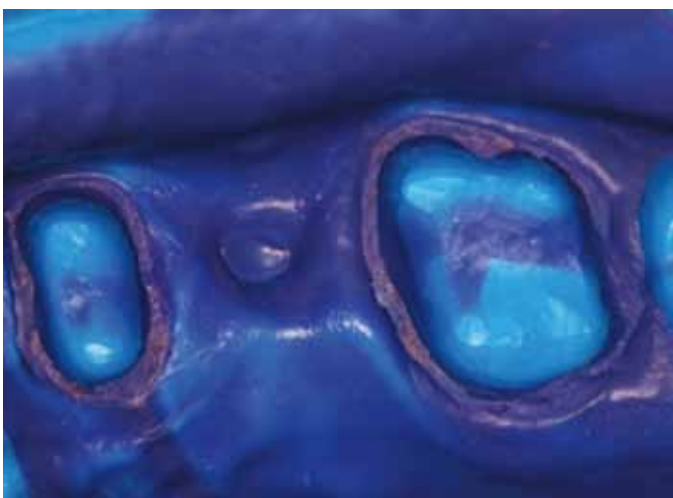

Impregnum™» – думка зубного техника), а також від'єднання від гіпсу.

– Що у матеріалі Identium® переконало Вас найбільше?

– По-перше, Identium® має нейтральний при-

смак. По-друге, позитивне враження зубного техника, з яким я працюю, по-третє, це результати роботи – мостоподібні протези, які не гірші, а набагато кращі, ніж виготовлені з матеріалу Impregnum™.



Д-р Дітмар Венг,
лікар-стоматолог,
приватна практика,
Штарнберг,
Німеччина

– Які Ви маєте побажання до відбиткових матеріалів?

– Одним з недоліків або слабких місць багатьох матеріалів є прецизійність, точність відтворення деталей. Наступне – це присмак у роті пацієнта під час зняття відбитку: які відчуття при введенні матеріалу у порожнину рота, який у нього присмак протягом 5–7 хвилин затвердіння. Стандартним матеріалом для порівняння у мене є поліефір, з яким я працюю вже протягом багатьох років. Цей матеріал через декілька хвилин має дуже гіркий присмак, що є неприємним для пацієнтів. Також завжди є проблемою від'єднання матеріалу при вийманні з рота пацієнта, коли відбитки зафіксовані дуже міцно. У такому випадку після затвердіння матеріалу відбитки дуже важко піддаються вийманню, особливо коли застосовується індивідуальна відбиткова ложка.

– Яким Вашим вимогам відповідає новий Identium®?

– Він дуже точно відтворює деталі. У нього суттєво кращий присмак, порівняно з іншими

матеріалами, які я знаю, і він без жодних проблем від'єднується у порожнині рота пацієнта.

– Який досвід Ви отримали з використання Identium® у різних клінічних ситуаціях стосовно якості відбитка?

– Використання цього матеріалу універсальне, тому не потрібно застосовувати різні відбиткові матеріали для різних ситуацій. Цей матеріал відзначається високою точністю відтворення деталей. Його можна дуже добре використовувати як для двофазної техніки, так і для імплантатів.

– Що у Identium® переконало Вас найбільше?

– Суттєво покращений присмак. Це те, про що я постійно чую від пацієнтів: «Чому у цього матеріалу такий жадливий присмак?». Один з найвідоміших у світі поліефірів на ринку вже багато років. Але стосовно присмаку не дуже багато змінилося. Матеріал, який пацієнтові слід тримати у роті 7 хвилин і одночасно уникати блювотного рефлексу, що протягом фази затвердіння спричиняє поганий присмак, не є оптимальним.

